
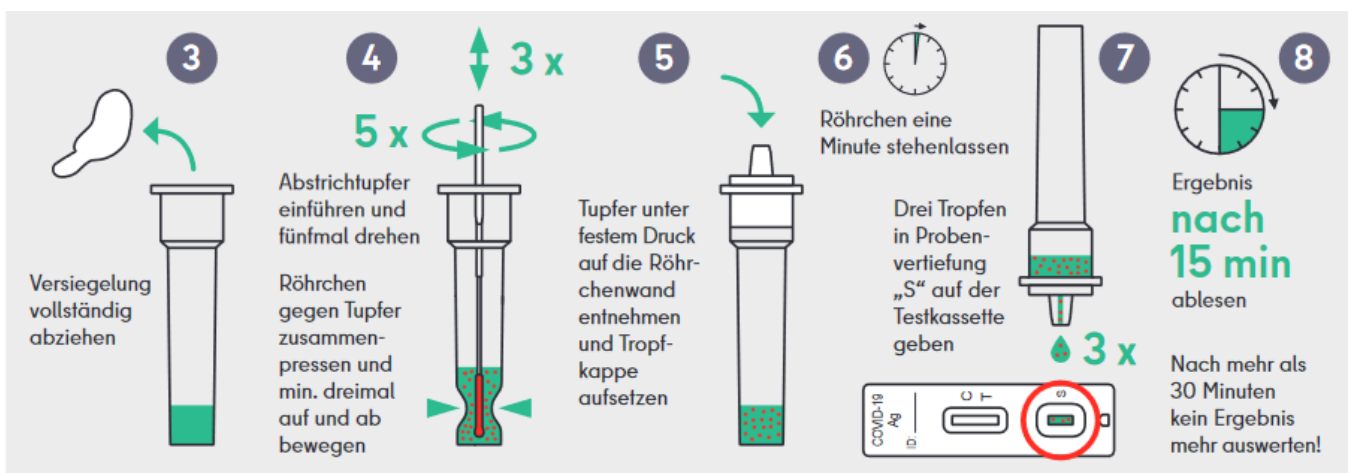
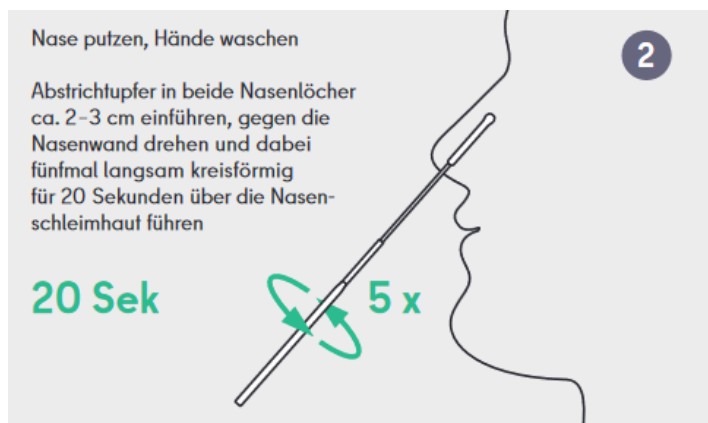


NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (Nasal Swap) an der RUB

Durchführung, Auswertung und Maßnahmen nach dem Test (Stand 16.03.2022)

Testdurchführung:


Die Testung soll **Zuhause** vorzugsweise **vor der Arbeit** durchgeführt werden.

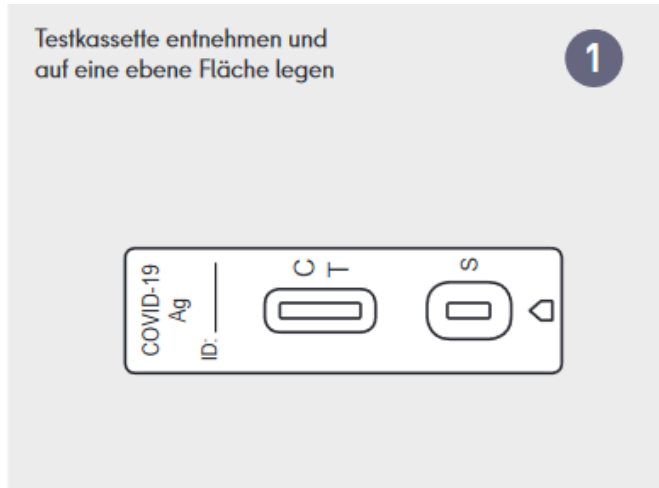

NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (Nasal Swap) an der RUB

Durchführung, Auswertung und Maßnahmen nach dem Test (Stand 16.03.2022)

Testauswertung:

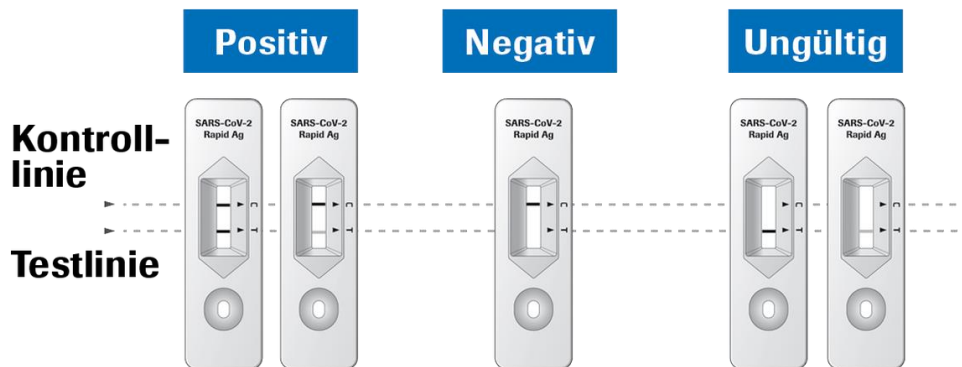

Positives Testergebnis

Das Vorhandensein einer **Testlinie (T)**, egal wie schwach sie ist, **zusammen mit einer Kontrolllinie (C)** ist ein positives Testergebnis.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie **sehr wahrscheinlich an COVID-19 erkrankt** sind.

Bitte wenden Sie sich umgehend unter Hinweis auf das positive Selbsttestergebnis an Ihren Arzt/ Hausarzt oder ein Corona-Testzentrum und halten Sie bis zur Klärung durch eine PCR-Testung eine häusliche Quarantäne ein.

Sie dürfen den Campus und Einrichtungen der RUB nicht betreten bis entweder eine negative Antigentest-Kontrolle oder PCR-Testergebnis vorliegt (d.h. der Selbsttest war falsch positiv und es liegt keine Coronainfektion vor) **oder die gesetzlich vorgeschriebene Quarantänezeit beendet ist.**

Ungültiges Testergebnis

Wenn **keine Kontrolllinie (C)** sichtbar ist, ist das Ergebnis als ungültig zu betrachten (der Test funktioniert nicht richtig).

Schauen Sie genau hin: auch wenn die Kontrolllinie nur schwach ist, kann der Test als gültig bewertet werden. Möglicherweise haben Sie den Test nicht korrekt durchgeführt. Daher den Test wiederholen (Anleitung sorgfältig beachten) oder eine Testkontrolle beim Arzt oder in einem Corona-Testzentrum durchführen lassen.

Negatives Testergebnis

Vorhandensein einer **Kontrolllinie (C)** (egal wie schwach sie ist) **aber keiner Testlinie (T)** bedeutet ein negatives Ergebnis. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Sie an COVID-19 erkrankt sind. Da jedoch trotz eines negativen Testergebnisses eine Infektion nicht ausgeschlossen ist, wiederholen Sie bei fortbestehenden COVID-19-verdächtigen Krankheitssymptomen am Folgetag den Antigentest als Selbsttest oder im Testzentrum oder wenden sich an Ihre/n Hausarzt/-ärztin.

Auch bei einem negativen Testergebnis unbedingt alle Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen weiter einhalten!

Entsorgung:

Bei Einzeltests sind die benutzten Testmaterialien Zuhause in einem stabilen, reißfesten und verschlossenen Müllbeutel im Restmüllbehälter zu entsorgen.

Bei (ausnahmsweisen) Testungen an der RUB sind diese in verschlossenen reißfesten und dickwandigen Müllsäcken in den Restmüllbehältern vor dem MA-Gebäude zu entsorgen. (Kontakt bei Fragen zur Entsorgung: Telefon 22345/24853, entsorgung@uv.rub.de).

Weitere Informationen: <https://diwamedical.com/wp-content/uploads/2021/12/Newgene-Antigentest-CE1434-zur-Laienanwendung.pdf>

Quelle: Senatsverwaltung Berlin – Kurzanleitung für den Selbsttest

<file:///C:/Users/wiegakf/AppData/Local/Temp/selbsttest-kurzanleitung-newgene-1.pdf>